



diasend[®] Clinic

– Hurtigveiledning

glooko

Innhold

Finn din enhet.....	3-4
Komme i gang med diasend® Clinic	5
Koble diasend® Transmitter-enheten til et strømuttak.....	5
diasend® Transmitter-enheten er klar til bruk når:	5
Koble pasientenheten til diasend® Transmitter-enheten.....	6
Overfør data.....	6
Logge på din diasend®Clinic-konto.....	6
Vise data	7
Opprette en pasientprofil og lagre pasientenheter	7
Vise data fra pasientenhetene	8
Dele data	9
Invitere pasienter til å laste opp hjemmefra	9
Opprette rapporter og skrive ut som PDF.....	9
Forklaring av indikatorene på diasend® Transmitter-enheten:	10
Transmitter-enhetens funksjon når alt fungerer som det skal:	10
Liste med kompatible enheter.....	11

Finn din enhet



Glukosemåler



CGM



Insulinpumpe



Insulinpenn

Abbott

FreeStyle	11
FreeStyle Flash.....	11
FreeStyle Freedom.....	11
FreeStyle Freedom Lite.....	11
FreeStyle InsuLinx	11
FreeStyle Lite.....	11
FreeStyle Mini	11
FreeStyle Optium.....	11
FreeStyle Optium H.....	11
FreeStyle Optium Neo	11
FreeStyle Papillon.....	11
FreeStyle Papillon InsuLinx	11
FreeStyle Papillon Lite	11
FreeStyle Papillon Mini	11
FreeStyle Papillon Vision	11
FreeStyle Precision.....	11
FreeStyle Precision H.....	11
FreeStyle Xido	11
Optium Mini	11
Optium Xceed	11
Optium Xido.....	11
Precision Xceed	11
Precision Xtra.....	11
FreeStyle Libre	11
FreeStyle Navigator.....	19
FreeStyle Navigator II	11

Acon Laboratories

On Call® Advanced	12
On Call® Plus	12
On Call® Resolve.....	12
On Call® Vivid.....	12

AgaMatrix

WaveSense Jazz™.....	12
----------------------	----

Animas

IR1200	20
IR1250	20
2020.....	20
OneTouch Ping.....	20
OneTouch Vibe Plus.....	20
Vibe	20

Apex Bio

GlucoSure Extra.....	12
GlucoSure Max.....	12

Arkray

GlucoCard 01.....	12
GlucoCard Expression	12
GlucoCard Shine.....	12
GlucoCard Vital.....	12
GlucoCard X-meter.....	12
GlucoCard X-mini plus	12
Relion Confirm	12
Relion Prime	12

Ascensia (Bayer)

Breeze 2.....	12
Contour.....	12
Contour link	12
Contour next.....	12
Contour next link.....	12
Contour next link 2.4.....	12
Contour next one.....	12
Contour next USB.....	12
Contour plus one.....	12

Contour TS	12
Contour XT	12
Contour USB.....	12

Beurer

GL50 evo.....	13
---------------	----

B. Braun

Omnitest 5.....	13
-----------------	----

Cambridge Sensors

Microdot+.....	13
----------------	----

Dexcom

G4 Platinum	13
G5 receiver.....	13
Touchscreen receiver G5/G6.....	13
SEVEN PLUS.....	13

Diatesse

XPER.....	13
-----------	----

Everymed

EveryX3.....	13
--------------	----

ForaCare

FORA Diamond MINI.....	19
FORA Diamond Prima.....	13

GE

GE100	13
-------------	----

GlucorX

HCT & Ketone	14
Nexus.....	14
Nexus Mini	14
Nexus Mini Ultra.....	14
Nexus Voice.....	14
Q.....	14

iCare

PalmDoc I.....	14
PalmDoc II	14

Infopia

Element.....	14
Finetest Lite.....	14
GlucoLab.....	14
GluNEO	14

Insulet


OmniPod.....	20
OmniPod Dash.....	20

Inside Biometrics


KEYA Smart	14
------------------	----

i-SENS


alphacheck professional NFC/ACURA PLUS.....	14
alphacheck professional.....	14
COOL/Bravo.....	14
CareSens BGMS/TEE2	14
CareSens N.....	14
CareSens N POP.....	14
CareSens N Voice.....	14

LifeScan	
 OneTouch Ping.....	15
OneTouch Select.....	15
OneTouch Select Plus.....	15
OneTouch Select Plus Flex.....	15
OneTouch Ultra.....	15
OneTouch Ultra2.....	15
OneTouch UltraEasy.....	15
OneTouch UltraMini.....	15
OneTouch UltraSmart.....	15
OneTouch Verio.....	15
OneTouch Verio (old).....	15
OneTouch Verio Flex.....	15
OneTouch Verio IQ.....	15
OneTouch Verio Pro.....	15
OneTouch Verio Sync.....	15
OneTouch Vita.....	15

Medcore	
 Care.....	15
GlucoSure Extra.....	15
GlucoSure Max.....	15

Menarini	
 GLUCOCARD MX.....	15
GLUCOCARD SM.....	15
GLUCOFIX iD.....	15
GLUCOFIX miò.....	16
GLUCOFIX miò Plus.....	16
GLUCOFIX Premium.....	16
GLUCOFIX TECH.....	15
GlucoMen areo.....	15
GlucoMen areo 2K.....	15
GlucoMen G+.....	16
GlucoMen Gm.....	15
GlucoMen LX.....	16
GlucoMen LX2.....	16
GlucoMen LX Plus.....	16
GlucoMen READY.....	16
GlucoMen Visio.....	16

Mendor	
 Discreet.....	16


Nipro	
 4SURE Smart.....	16
4SURE Smart Duo.....	16
TRUE METRIX.....	16
TRUE METRIX AIR.....	16
TRUEresult.....	16
TRUEyou.....	16
TRUEyou mini.....	16

Nova	
 Max Link.....	16
Max Plus.....	16

Pendiq	
 pendiq.....	22


Pic Solution	
 Pic Gluco Test.....	16

Prodigy	
 AutoCode.....	16

Roche	
 Accu-Chek Active.....	17
Accu-Chek Aviva.....	18
Accu-Chek Aviva Combo.....	18
Accu-Chek Aviva Connect.....	17
Accu-Chek Aviva Expert.....	18
Accu-Chek Compact.....	18
Accu-Chek Compact Plus.....	18
Accu-Chek Guide.....	17
Accu-Chek Instant.....	17
Accu-Chek Instant S.....	17
Accu-Chek Mobile (IR).....	18
Accu-Chek Mobile (USB).....	17
Accu-Chek Nano.....	18
Accu-Chek Performa.....	18
Accu-Chek Performa Connect.....	17

 Accu-Chek Insight.....	21
Accu-Chek Spirit.....	21
Accu-Chek Spirit Combo.....	21

Sanofi	
 BGStar.....	17
MyStar Extra.....	17

Senseonics	
 Eversense CGM Transmitter.....	17

SOOIL	
 DANA Diabecare R.....	22


Smiths Medical	
 CoZmo 1700.....	20

Tandem	
 t:flex.....	20
t:slim.....	20
t:slim X2.....	20
t:slim G4.....	20

Terumo	
 Finetouch.....	17

ViCentra	
 Kaleido.....	20

VivaChek	
 Fad.....	17

Wellion	
 Calla Dialog.....	17
Calla Light.....	17
Calla Mini.....	17
Calla Premium.....	17
Galileo GLU/KET.....	17
Leonardo GLU/KET.....	17
Galileo GLU/CHOL.....	17
Leonardo GLU/CHOL.....	17
Linus.....	17

Ypsomed	
 mylife Pura.....	17
mylife Unio.....	17
mylife OmniPod.....	20

Oversikt

diasend® Clinic

diasend® tilbyr en online-løsning til helsevesenet, som samler inn og lagrer alle data fra diabetespasienter sentralt, uten at man trenger å installere noen programvare. Uansett om enheten overfører data via en kabel, Bluetooth, infrarød overføring eller en mobilapp, blir all opplastet informasjon umiddelbart tilgjengelig på nettet i en sikker diasend.com-konto. Alle data fra flere enheter blir slått sammen og presentert i én rapport.

Komme i gang med diasend® Clinic

- 1 Koble diasend® Transmitter-enheten til et strømuttak



- 2 diasend® Transmitter-enheten er klar til bruk når:



1. Den grønne ok-indikatoren har sluttet å blinke.
Langsomt blinkende indikator betyr at senderen startes opp.
Raskt blinkende indikator betyr at senderen oppdaterer.

2. Den blå send-indikatoren blinker langsomt.

i Merk: Vær oppmerksom på at USB-huben må få strøm fra en egen strømforsyning vis du har en USB-hub koblet til diasend® Transmitter-enheten.

i Obs! På side 10 finner du en grundig forklaring av indikatorene på diasend® Transmitter-enheten.

3 Koble pasientenheten til diasend® Transmitter-enheten



Hver pasientenhet kobles til på én av følgende tre måter:

- USB-kabel (USB-port eller USB-hub)
- Bluetooth (krever spesifikk Bluetooth-enhet)
- Infrarød (innebygd IR-mottaker eller SmartPix-kabel for enkelte enheter).

i Spesifikke anvisninger for opplasting av alle kompatible pasientenheter finnes på side 11 i denne veiledningen.

4 Overfør data



1 Koble til pasientenheten – den blå send-indikatoren blinker hurtig mens dataene lastes opp.

2 Vent mens den blå send-indikatoren slutter å blinke hurtig og den grønne ok-indikatoren tennes.

3 Så snart den grønne ok-indikatoren lyser, kan du logge deg inn og se dataene på www.diasend.com eller fortsette å laste opp flere pasientenheter. Klikk Last siden på nytt hvis du allerede var logget inn. Merk at siden diasend® er nettskybasert, kan du når som helst se igjennom de opplastede dataene.

5 Logge på din diasend® Clinic-konto



Gå til www.diasend.com for å logge på diasend® og hente opplastede data.

6 Wise data

Klinikk

I Klinikk-fanen er det mulig å vise data uten å opprette en pasientprofil.

glooko • diasend

Pasienter **Klinikk** INNSTILLINGER KONTO PROFIL LOGG UT

Siste oppdateringer (Mai 2016) Kundestøtte

Nylige opplastinger på klinikken

I denne visningen kan du se alle enheter du har lastet opp på klinikken i dag.

Serg for å velge rett enhet til gjeldende pasient.
Sjekk at serienummeret er lik enhetens serienummer.

Last siden på nytt — Klikk her etter du har gjennomført en opplasting med din diasend® Transmitter.

Vis valgte enheter Opprett pasientprofil for valgte enheter Lagre enhet/-er til eksisterende pasientprofil

Tid	Pasient	Serienummer	Siste blodsukker	Siste ketoner	Velg
09:42	Pierce, Annette	7910778 (Bayer Contour)	13/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:16	Powell, Arlene	8229504 (Bayer Contour)	14/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:40	Patterson, Dave	4188077 (Bayer Contour)	02/08/2011	-	<input type="checkbox"/>

Merk av for opplastingen du vil vise.

1

Klikk på Vis valgte enheter for å vise opplastingen.

2



Vær oppmerksom på at alle opplastinger fjernes fra Klinikk-visningen etter midnatt samme dag, men ingen data blir slettet.

7 Opprette en pasientprofil og lagre pasientenheter

En pasientprofil kan opprettes på to måter. I Klinikk-fanen og i pasientfanen.

Klinikk

Opprette en pasientprofil i klinikkfanen:

glooko • diasend

Pasienter **Klinikk** INNSTILLINGER KONTO PROFIL LOGG UT

Siste oppdateringer (Mai 2016) Kundestøtte

Nylige opplastinger på klinikken

I denne visningen kan du se alle enheter du har lastet opp på klinikken i dag.

Serg for å velge rett enhet til gjeldende pasient.
Sjekk at serienummeret er lik enhetens serienummer.

Last siden på nytt — Klikk her etter du har gjennomført en opplasting med din diasend® Transmitter.

Vis valgte enheter Opprett pasientprofil for valgte enheter Lagre enhet/-er til eksisterende pasientprofil

Tid	Pasient	Serienummer	Siste blodsukker	Siste ketoner	Velg
09:42	Pierce, Annette	7910778 (Bayer Contour)	13/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:16	Powell, Arlene	8229504 (Bayer Contour)	14/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:40	Patterson, Dave	4188077 (Bayer Contour)	02/08/2011	-	<input type="checkbox"/>
16:25	Garner, Dennis	9345638 (Bayer Contour)	19/07/2011	-	<input type="checkbox"/>

Merk av for opplastingen du vil opprette en pasientprofil for.

1

Klikk her for å opprette en pasientprofil for den valgte enheten.

2



Vi anbefaler å bruke denne metoden for å registrere enheter på en pasient, for å unngå manuell registrering av pasientenheter i pasientfanen.

Pasienter ← Opprette en pasientprofil i pasientfanen:

1. Klikk på Ny pasient.

2. De obligatoriske feltene er for- og etternavn. Du finner flere alternativer under Utvid registreringsskjema.

3. Merk av i boksen for å la pasienten se sine data hjemmefra: "Tillat pasienter å logge inn i diasend®-systemet og se rapporter"

- Hvis du gjør dette i registreringsprosessen, må du opprette et brukernavn og passord for pasienten.
- Hvis du merker av i ruten etter at du har opprettet en pasientkonto, oppretter diasend® et brukernavn for deg. I så fall trenger du bare å opprette et passord.

4. Når du er ferdig, klikker du på: "Lagre pasientinformasjon".


8 Vise data fra pasientenhetene

Blodsukker CGM Insulin Sammenligning Sammensetting

Dataene vises i de fem fanene over, der du har tilgang til glukose-, CGM - og insulindata. Du finner mer informasjon om våre rapporter i diasend® Report-veiledningen på nettstedet vårt.


9 Dele data

Pasienter som har sin egen diasend® Personal-konto kan laste opp pasientenhetene sine hjemmefra, og de kan dele sine opplastede data med opptil to ulike helseinstitusjoner. For at pasienter skal kunne dele sine data med deg, trenger de den unike identifikatoren i diasend® som heter Klinikk-ID. Den finner du under Kontoprofil > Pasientlenker.

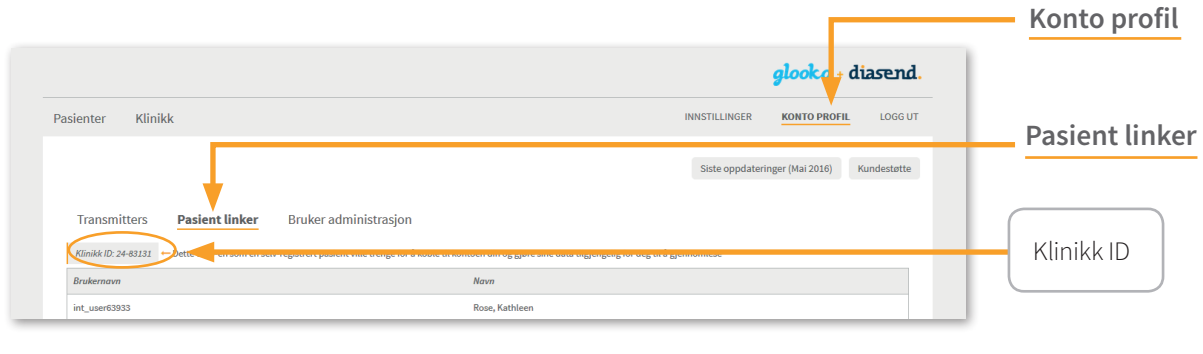


10 Invitere pasienter til å laste opp hjemmefra

For å gjøre det lettere for klinikker og pasienter å dele data, har vi lagt til en inviter-knapp i nettapplikasjonen. Det betyr at klinikker kan invitere pasienter til å laste opp data hjemmefra.

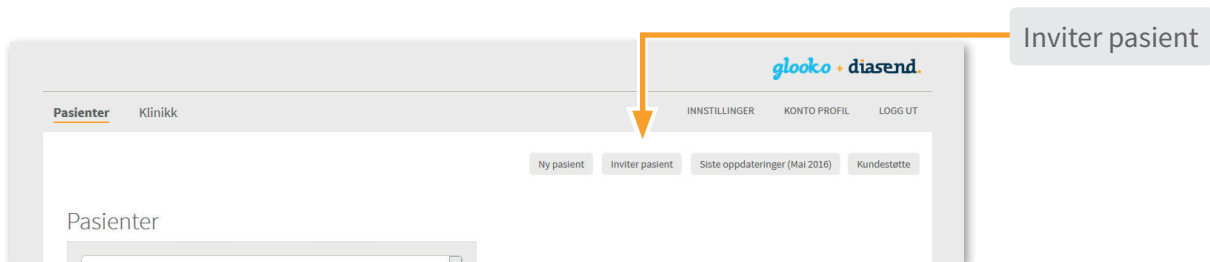


11 Opprette rapporter og skrive ut som PDF

En rapport kan genereres som pdf-fil på to måter. Du kan enten klikke på «Print til PDF»-ikonet for å opprette en rapport av den aktuelle visningen umiddelbart. Du kan også klikke på PDF veiviser-knappen for å generere en rapport med forhåndsinnstilte variabler. Du kan justere dette verktøyet under «Innstillinger»

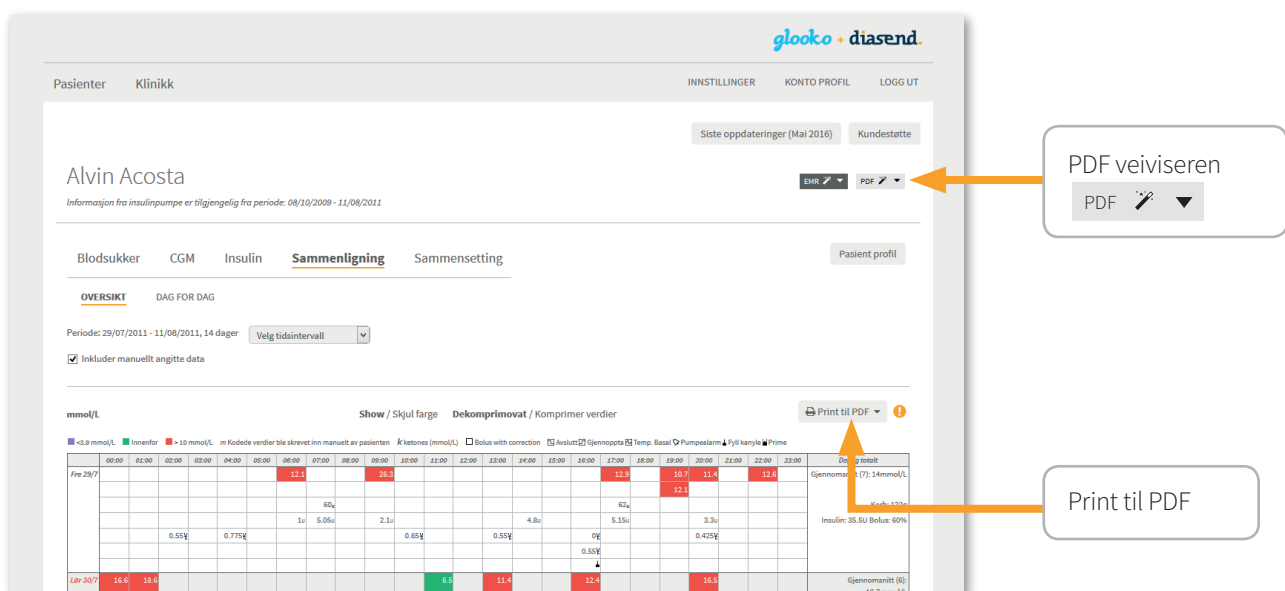

Forklaring av indikatorene på diasend® Transmitter-enheten:



ok

- **LANGSOM BLINKING**
ok-indikatoren blinker langsomt når Transmitter-enheten kobles til GSM-nettverket.
- **RASK BLINKING**
Transmitter-enheten oppdaterer seg selv. ok-indikatoren blinker hurtig under en lengre periode. Du kan begynne å bruke Transmitter-enheten straks den blå send-indikatoren blinker langsomt igjen.
- **KONTINUERLIG LYS**
Indikatoren viser vellykket opplasting.


send

- **LANGSOM BLINKING**
Transmitter-enheten er klar til bruk.
- **RASK BLINKING**
Data lastes opp.

error
(feil)

- **KONTINUERLIG LYS**
Indikatoren angir at den siste oppdateringen var mislykket. Dette skyldes sannsynligvis midlertidige problemer med det trådløse GSM-nettverket. Prøv å laste opp pasientenheten igjen.
- **RASK BLINKING**
Indikatoren blinker sammen med ok-indikatoren hvis Transmitter-enheten ikke finner noe nettverk. Merk at du kan undersøke signalets styrke og kvalitet under «Konto profil» på kontoen din.

diasend® Transmitter-enhetens funksjon når alt fungerer som det skal:

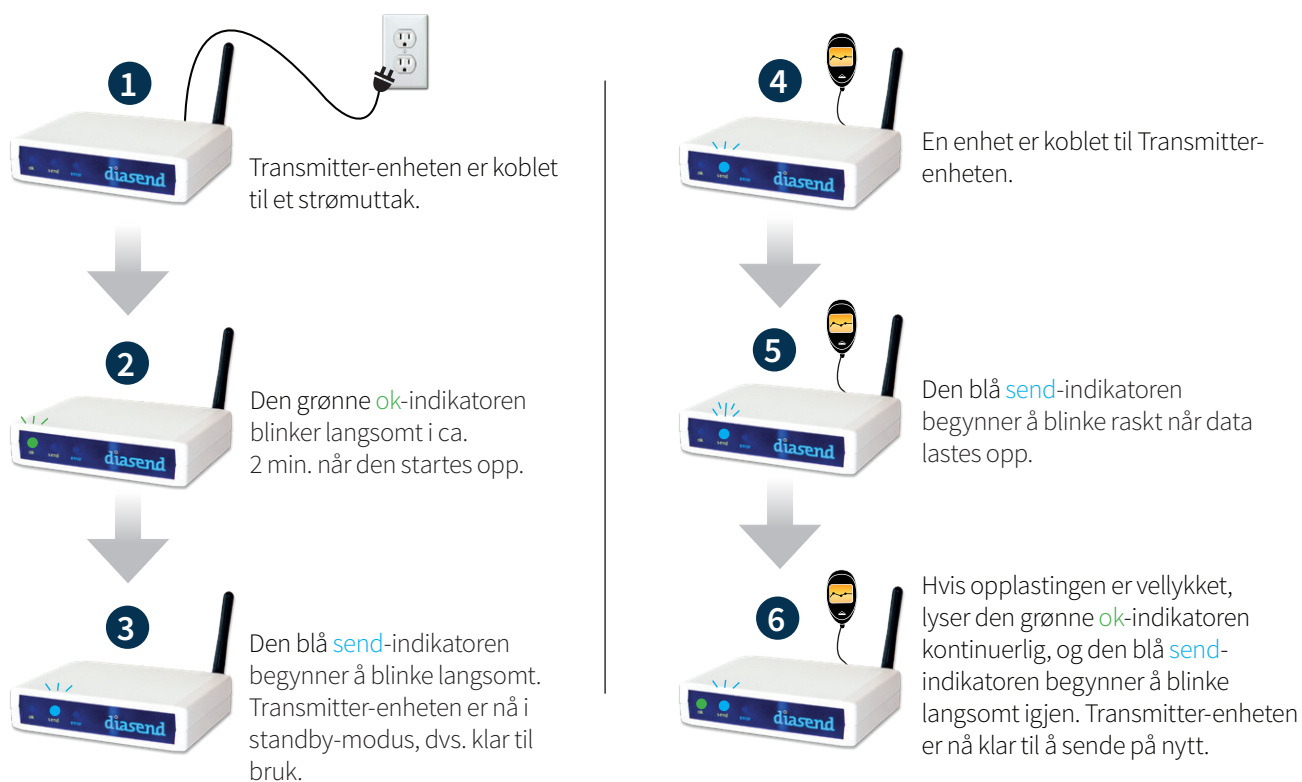


- 1** Transmitter-enheten er koblet til et strømuttak.
- 2** Den grønne **ok**-indikatoren blinker langsomt i ca. 2 min. når den startes opp.
- 3** Den blå **send**-indikatoren begynner å blinke langsomt. Transmitter-enheten er nå i standby-modus, dvs. klar til bruk.
- 4** En enhet er koblet til Transmitter-enheten.
- 5** Den blå **send**-indikatoren begynner å blinke raskt når data lastes opp.
- 6** Hvis opplastingen er vellykket, lyser den grønne **ok**-indikatoren kontinuerlig, og den blå **send**-indikatoren begynner å blinke langsomt igjen. Transmitter-enheten er nå klar til å sende på nytt.

Liste over kompatible enheter

Nedenfor finner du en liste med enheter som er kompatible med diasend®. Med mindre det er gitt eksplisitte opplastingsanvisninger for den aktuelle enheten, trenger du bare å koble den til Transmitter-enheten eller USB-huben med den spesifikke USB-kabelen for å laste den opp automatisk. (Gå til diasend.com for å se en oppdatert liste med kompatible enheter og kjente begrensninger.)

i Vær oppmerksom på at noen av de følgende pasientenheter muligens ikke er tilgjengelig i ditt marked.

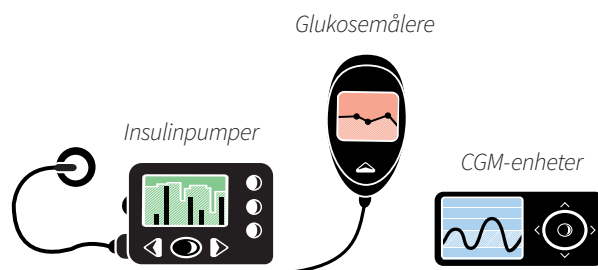

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

i Forsikre deg om at USB-huben er koblet til et strømuttak. Kontroller også at USB-huben er koblet til diasend® Transmitter-enheten.



Abbott

FreeStyle
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
FreeStyle Mini
FreeStyle Optium

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision
FreeStyle Xido
Optium Mini

Abbott FreeStyle USB-kabel (2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx

Micro USB



FreeStyle Navigator II

Mini USB




FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra

Abbott Xceed USB-kabel



Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

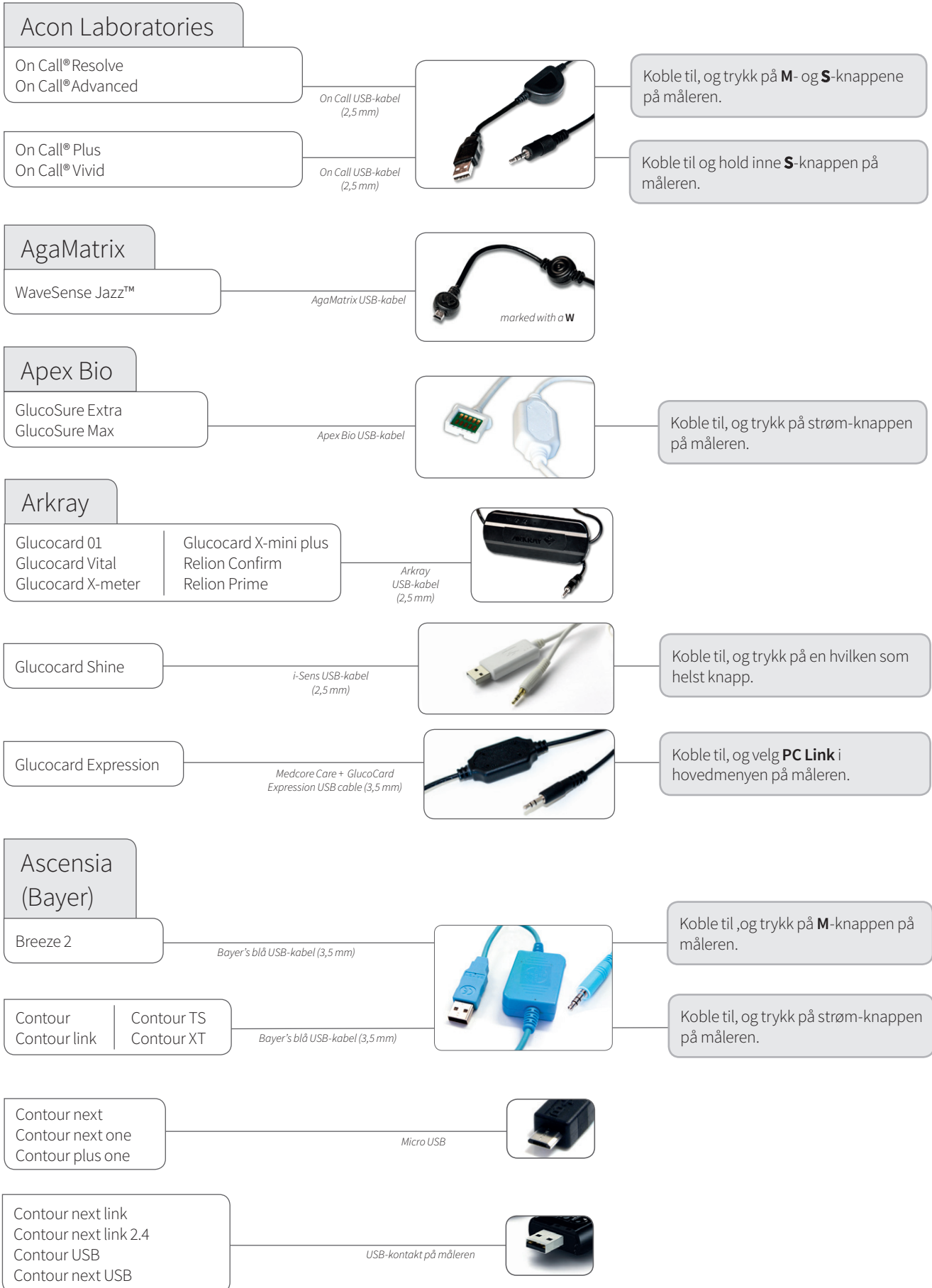

Fortsatt fra forrige side

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

Beurer

GL50 evo

USB-kontakt på måleren



B. Braun

Omnitest 5

Micro USB



Cambridge Sensors

Microdot+

Microdot+ USB-kabel (2,5 mm)



Dexcom

G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Receiver G5/G6

Micro USB



SEVEN PLUS

Seven Plus USB-kabel (Micro USB)



Hvis opplastingen ikke starter, kobler du fra måleren og velger Avslutt i menyen for å slå av måleren. Slå på måleren igjen og koble den til senderen.

Diastesse

XPER

Mini USB



Everymed

EveryX3

Micro USB



Koble til, og trykk på **OK**-knappen på måleren.

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB




GE

GE100

Bionime (Pura + Rightest) USB-kabel



Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

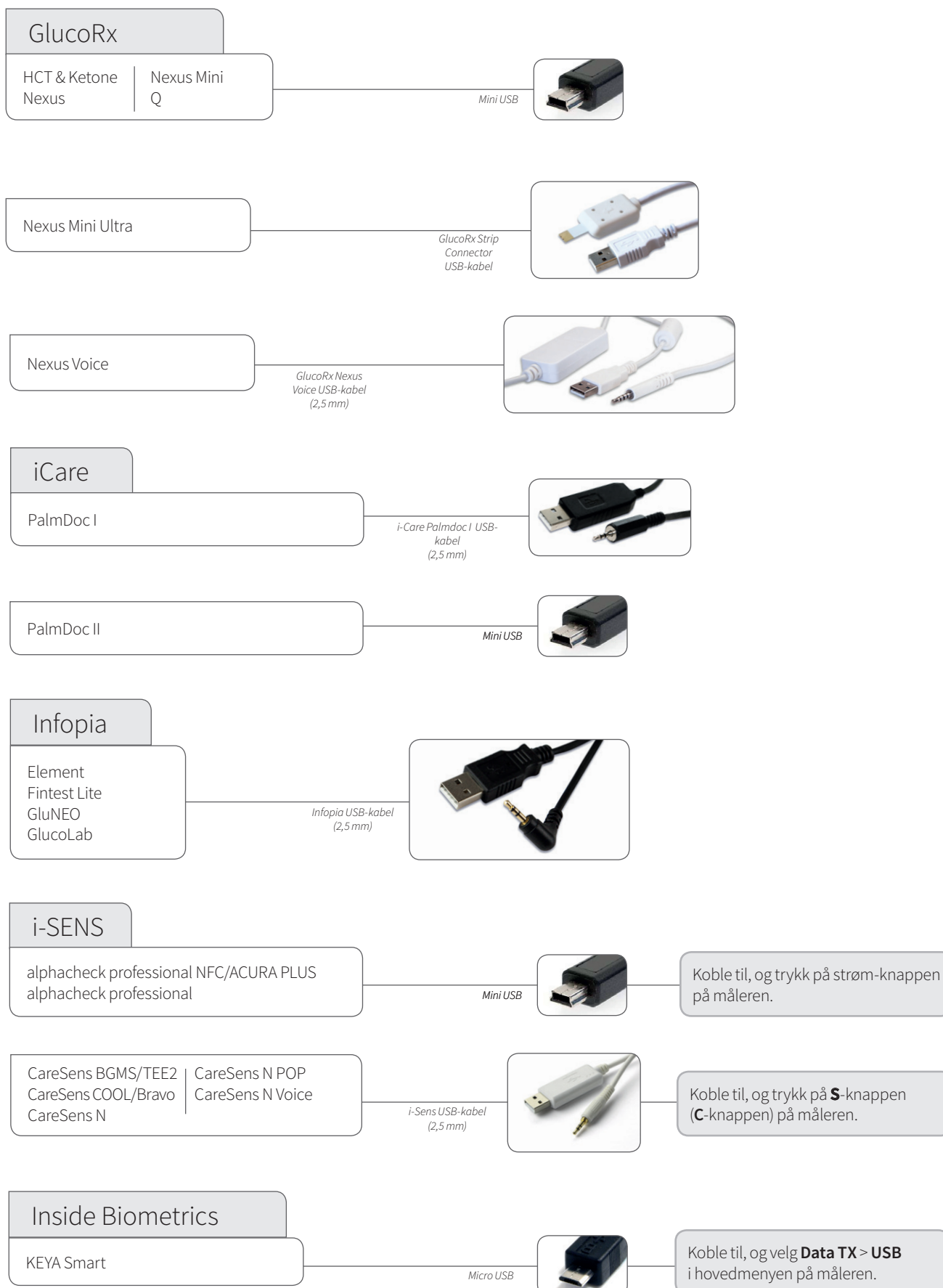

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

LifeScan

OneTouch Ping

Mini USB



Koble til, og trykk på strøm-knappen på måleren.

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex

Micro USB



OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

Mini USB



OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

LifeScan USB-kabel
(2,5 mm)



OneTouch UltraSmart

LifeScan USB-kabel
(2,5 mm)



Koble til, og trykk på en hvilken som helst knapp.

Medcore

Care

Medcore care USB-kabel
(3,5 mm)



Koble til, og trykk på strøm-knappen på måleren.

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Medcore USB-kabel



Koble til, og trykk på strøm-knappen på måleren.

Menarini

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GLUCOFIX TECH

Menarini GlucoMen areo USB-kabel (2,5 mm)



GlucoMen Gm
Glucofix iD
Glucocard MX

Menarini hvit USB-kabel (2,5 mm)




Hvis måleren viser: **E-3**, kobler du den fra og venter til displayet slukkes, og kobler den deretter til igjen.

GLUCOCARD SM

Micro USB



Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

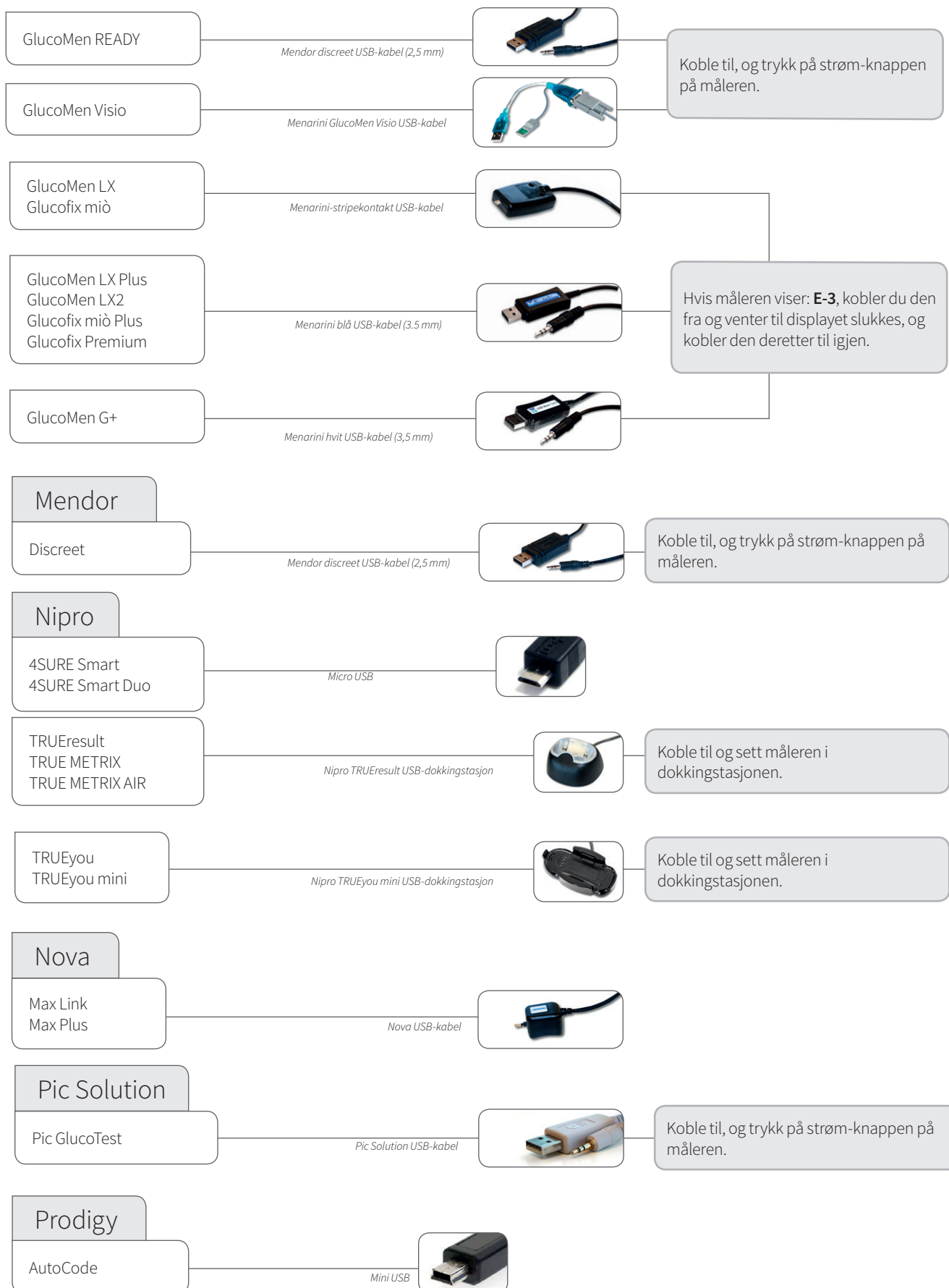

Glukosemålere og CGM-enheter - tilkobling med USB-kabel

Roche Accu-Chek

Active Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect

Guide Instant
Instant S

Micro USB



Etter tilkoblingen skal opplastingen starte innen 20 sekunder etter at kabelen er koblet til. Hvis det ikke skjer, går du til hovedmenyen på måleren. Gå til **My data > Data Transfer > Reports** og koble måleren til USB-kabelen igjen.
(Ikke hold inne de to pilknappene.)

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

Sanofi USB-kabel



Senseonics

Eversense CGM Transmitter


OBS!
Eversense Smart Transmitter (CGM) kan ikke lastes opp via diasend® Transmitter.

Dataene fra Eversense CGM kan bare lastes opp til diasend® via "Koble til app" i pasientens diasend®-konto. Vennligst se flere instruksjoner i brukerveiledningen for pasienter på: <https://support.diasend.com>

Terumo

Finetouch

Terumo USB-kabel

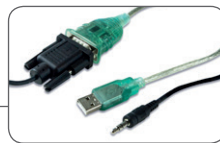

VivaChek

Fad

VivaChek USB-kabel



Koble til, og trykk på strøm-knappen på måleren.

Wellion

Calla Dialog

Wellion Calla USB-kabel (3,5 mm)



Koble til, og velg PC Link i hovedmenyen på måleren.

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo GLU/KET
Leonardo GLU/KET
Galileo GLU/CHOL
Leonardo GLU/CHOL

Wellion Calla mini USB-kabel



Linus

Wellion Linus USB-kabel



Ypsomed

mylife Pura

mylife Pura USB-kabel



mylife Unio

Mini USB





Infrarøde glukosemålere

Sett måleren i opplastingsmodus ved å følge anvisningene nedenfor. Hold oversiden på glukosemåleren rett mot IR-vinduet på diasend® Transmitter-enheten.

i Hold enheten helt stille mens opplastingen pågår. Ikke fjern enheten før den grønne ok-indikatoren tennes.

IR-vindu på Transmitter-enheten



Roche

Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa



Aktiver IR-overføringen ved å holde de to pilknappene inne til du ser to piler på displayet.

Accu-Chek Compact



Aktiver IR-overføringen ved å holde de to øverste knappene på måleren inne til du ser to piler på displayet.

Accu-Chek Compact Plus



Aktiver IR-overføringen ved å holde inne knappene **S** og **M** under displayet til du ser to piler på displayet.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



Åpne hovedmenyen, gå til **My data** og velg **Data transfer**.

Accu-Chek Mobile (IR)



1. Hold inne de to pilknappene.
2. Velg det første alternativet i data transfer-menyen (**for analysis**). Obs! Hvis målerens serienummer begynner med U1, ser du instruksjonene for Accu-Chek Mobile (USB) på side 16.

Bluetooth-glukosemålere

Du trenger en Bluetooth USB-adapter for å kunne overføre data fra Bluetooth-enheter. Bluetooth som sendemetode krever at enheten plasseres i nærheten av diasend[®] Transmitter-enheten.



Abbott

FreeStyle Navigator



Gå til **Menu > System > Upload** på måleren.
Velg og bekreft for å aktivere.

FORACARE


FORA Diamond MINI



1. For å aktivere Bluetooth, slår du på måleren ved å holde inne av/på-knappen.
2. Slå av måleren ved å holde inne av/på-knappen. LED-indikatoren nede til høyre på måleren blinker blått for å vise at Bluetooth er aktivert. Den lyser deretter kontinuerlig for å vise at data lastes opp.

Obs! Versjonen som støttes er den med integrert Bluetooth.


Insulinpumper - tilkoblet med standard USB-kabler

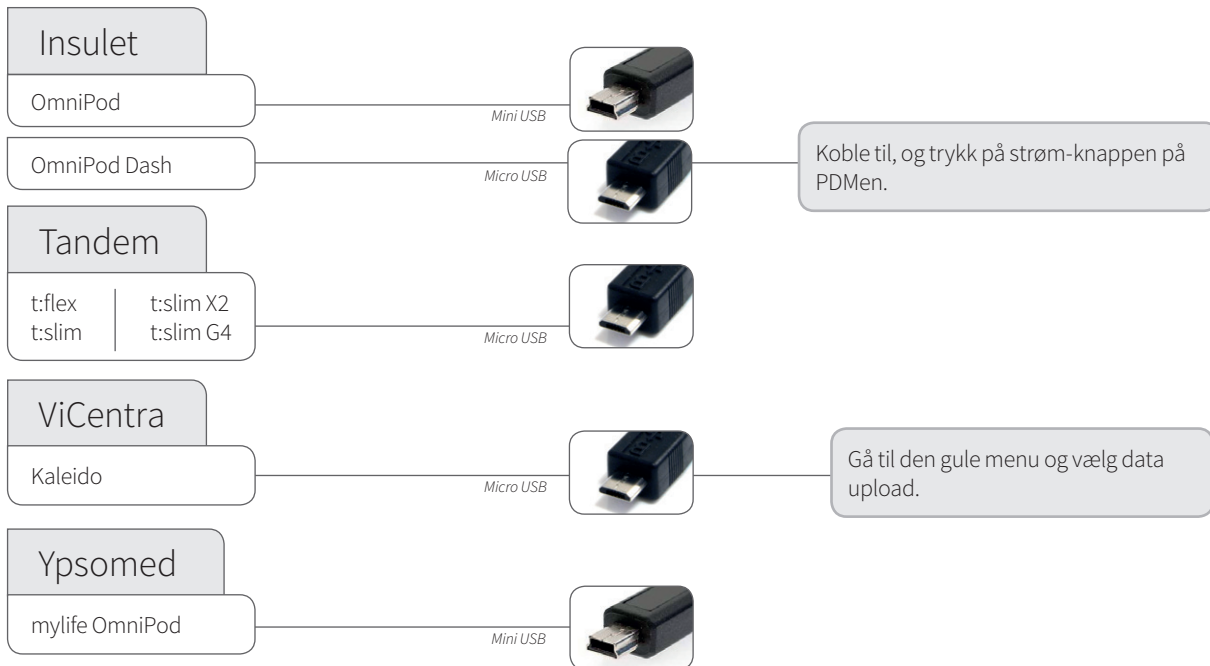

Infrarøde insulinpumper

For Animas-pumper: Kontroller at pumpen ikke er aktivert og at skjermen er tent når sendingen begynner (skjermen trenger ikke å være tent under hele sendingen). Pumpen må holdes helt stille, og må ikke fjernes før den grønne ok-indikatoren er tent.

IR-vindu på Transmitter-enheten

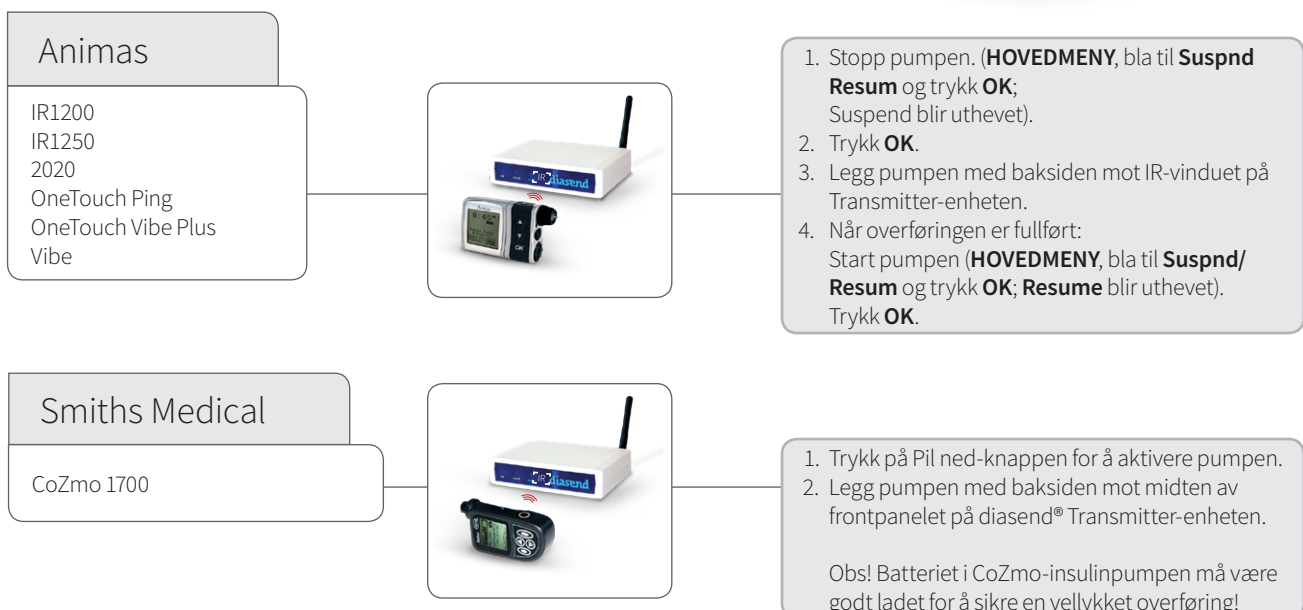



Insulinpumper - tilkoblet med infrarøde kabler

Kompatible infrarøde kabler

Roche Accu-Chek
Smart Pix-kabel




Roche Accu-Chek
Smart Pix 2-kabel



Roche

Accu-Chek Insight

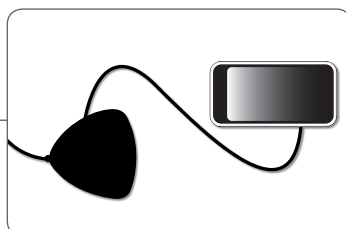

Smart Pix 2
Obs! Koble håndsettet til pumpen til Smart Pix 2 med en micro USB-kabel.

1. Koble Smart Pix 2-kabelen til Transmitter-enheten og vent til den blå indikatoren på Smart Pix 2 begynner å blinke langsomt.
2. Koble håndsettet til Smart Pix 2 med en micro USB-kabel.
3. Åpne menyen i håndsettet, og velg **Connect to PC** og trykk **OK**.
4. Sørg for at pumpen er innenfor håndsettets rekkevidde.
5. Den blå indikatoren på Smart Pix 2 lyser mens data overføres fra enheten til Smart Pix 2.
6. Den blå indikatoren slår seg av selv, og både Smart Pix 2 og enheten avgir en lyd som indikerer at data overføres fra Smart Pix 2 til Transmitter-enheten. Ikke koble fra Smart Pix 2 ennå!
7. Vent til Transmitter-enheten viser at opplastingen var vellykket (den grønne ok-indikatoren lyser kontinuerlig).

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix eller Smart Pix 2
Obs! Smart Pix programvareversjon 3.02 eller høyere kreves ved bruk av Smart Pix.

1. Koble Smart Pix til Transmitter-enheten og vent til den blå indikatoren på Smart Pix begynner å blinke sakte.
2. Sett pumpen i **Data Transfer**-modus (stopp pumpen og gå inn på **Data Transfer**-menyen).
3. Sett pumpen med IR-mottakeren mot Smart Pix. Den blå indikatoren signaliserer at data overføres til Smart Pix.
4. Vent til den blå indikatoren begynner å blinke sakte igjen, eller slutter å blinke.
5. Data overføres nå fra Smart Pix til Transmitter-enheten. Ikke koble fra Smart Pix ennå!
6. Vent til Transmitter-enheten viser at opplastingen var vellykket (den grønne ok-indikatoren lyser kontinuerlig).

Bluetooth-insulinpumper

Du trenger en Bluetooth USB-adapter for å kunne overføre data fra Bluetooth-enheter. Bluetooth som sendemetode krever at enheten plasseres i nærheten av diasend® Transmitter-enheten.



SOOIL
DANA Diabecare R



1. Velg **Main menu**.
2. Gå til **Setting**.
3. Velg **Discovery**.
4. Send-indikatoren skal begynne å blinke raskt. Hvis den ikke gjør det, og pumpen slår seg av, prøver du igjen.
5. Vent til send-indikatoren slutter å blinke raskt og ok-indikatoren tennes.

Insulinpennner - tilkoblet med standard USB-kabel

Følg instruksjonene nedenfor for å overføre data fra en insulinpenn.

i Forsikre deg om at USB-huben er koblet til et strømuttak. Kontroller også at USB-huben er koblet til diasend® Transmitter-enheten.



Pendiq
pendiq



Påse at kabelen er riktig satt inn. Insulinpennens kontrollampe begynner å blinke, og opplastingen starter etter 10-15 sekunder.



ADVARSEL!

All medisinsk diagnostisering og behandling av pasienter skal foregå under tilsyn av kvalifisert helsepersonell. diasend® er ikke beregnet på å gi automatiske beslutninger om behandling eller å erstatte helsepersonellets vurderinger. diasend® er ikke beregnet på nødalarmer eller på overføring eller angivelse av alarmer i sanntid eller data hvor tiden er avgjørende. diasend® er ikke beregnet på å erstatte direkte medisinsk overvåking eller akutte inngrep.

Kundestøtte

+47 23 65 32 59

norway@diasend.com

www.diasend.com



A2032v11PQG_NO_diasend-clinic (2019-02-12)

diasend® er beregnet på bruk av privatpersoner eller helsepersonell i hjemmet eller på helseinstitusjoner til overføring av data fra hjemmemålingsapparater som glukosemålere og insulinpumper til en serverbasert database for å støtte diabetesbehandling. diasend® er indisert for profesjonell bruk og direktealg.