








LEGENDA PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 02 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • EMOCROMO • VES • RETICOLOCITI 	<p>TAPPO LILLA TRASPARENTE 13x75 da 3,0 mL (sangue intero K2EDTA)</p> <p>CODICE:BD-368856</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI</p>
<ul style="list-style-type: none"> • TEST COAGULAZIONE SEMPLICE • TEST COAGULAZIONE SPECIALE • D-DIMERO • FATTORI COAGULATIVI 	<p>TAPPO CELESTE 13x75 da 2,7 mL (Plasma Sodio Citrato)</p> <p>CODICE:BD-364305</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10 A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10 A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER COAGULAZIONE SPECIALE, D-DIMERO E FATTORI COAGULATIVI</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • GRUPPI SANGUIGNI • TEST DI COOMBS • ASSETTI EMOGLOBINICI • SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE • TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE • TEST DI GENETICA MOLECOLARE 	<p>TAPPO LILLA 13x75 da 4,0 mL (K2 EDTA)</p> <p>CODICE: BD-368861</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER ACTH, ALDOSTERONE, AMMONIO, CATECOLAMINE PLASMATICHE, RENINA E VITAMINA B6.</u> <u>SANGUE INTERO CONGELATO PER VITAMINE B1 E B2</u></p>



LEGENDA PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 02 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • CHIMICA CLINICA • IMMUNOMETRIA • SIEROIMMUNOLOGIA SU ROCHE COBAS 	<p>TAPPO VERDE CHIARO 13x100 da 4,5 mL (Plasma Litio Eparina)</p> <p>CODICE: BD-367376</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER CALCITONINA</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • CURVE DA CARICO DI GLUCOSIO • GLICEMIE POST PRANDIALI • TUTTE LE GLICEMIE CHE NON POSSONO ESSERE CONSEGNATE IN GIORNATA IN RDI • ACIDO LATTICO 	<p>TAPPO GRIGIO CHIARO 13x75 da 2,0 mL (Stabilizzante Fluoro ossalato)</p> <p>CODICE: BD-368920</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER ACIDO LATTICO</u></p>



LEGENDA PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 02 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • MARCATORI EPATITE A • AC. ANTI TREPONEMA • ENOLASI NEUROSPECIFICA • AC. ANTI TIROIDE • FREE BETA HCG • PAPP-A • ACIDI BILIARI • CATENE LEGGERE KAPPA E LAMBDA 	<p>TAPPO BEIGE 13x100 da 6,0 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD-368863</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>SIERO CONGELATO PER FREE BETA HCG, PAPP-A</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • TUTTI GLI ESAMI SU SIERO CHE RDI INVIA IN SERVICE 	<p>TAPPO BLU 13x100 da 6,0 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD-368814</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>SIERO CONGELATO PER ADH</u></p>

LEGENDA PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 02 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • ELETTROFORESI • IMMUNOELETTROFORESI • CDT • FARMACI • VITAMINE 	<p>TAPPO ROSSO 13x100 da 6,0 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD-368815</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>SIERO CONGELATO PER VITAMINA A, VITAMINA E</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • ESAMI DI TOSSICOLOGIA • ESAMI SU PLASMA CHE RDI INVIA IN SERVICE 	<p>TAPPO VERDE SCURO 13x75 da 4,0 mL (Litio eparina)</p> <p>CODICE: BD-368884</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM <u>SOLO PER ALLUMINIO, COBALTO E VITAMINA C</u></p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE PLASMA <u>SOLO PER ALLUMINIO, COBALTO, ZINCO E VITAMINA C</u>; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p> <p><u>PLASMA CONGELATO PER VITAMINA C</u></p>

LEGENDA PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 02 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • ESAMI DI CITO-GENETICA 	<p>TAPPO VERDE SCURO 13x100 da 6,0 mL (Sodio eparina)</p> <p>CODICE: BD-367876</p>		<p>RDI: NO CENTRIFUGAZIONE</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p> <p>SERVICE: CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA 5°C- 25°C</p>
<ul style="list-style-type: none"> • DOSAGGI DI ANTICORPI DI VIRUS E BATTERI • DOSAGGI DI ALLERGENI • AUTOIMMUNITÀ 	<p>TAPPO ROSA 13x100 da 6,0 mL (Siero)</p> <p>CODICE: BD-368817</p>		<p>RDI: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM</p> <p>ADERENTI: TRASPORTO CAMPIONI A TEMPERATURA CONTROLLATA (5°C-25°C)</p> <p>SERVICE: CENTRIFUGAZIONE PER 10' A 3000 RPM E SEPARAZIONE SIERO; CONSERVAZIONE E TRASPORTO CAMPIONI REFRIGERATI.</p>

LEGENDA PROVETTE PER SANGUE RDI (rev. 02 del 28/08/2018)

TIPOLOGIA ESAME	KIT DA UTILIZZARE	COLORE PROVETTA	INDICAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • QUANTIFERON 	<p>TAPPI GRIGIO, VERDE, GIALLO, VIOLA 13x75 da 1,0 mL (sangue intero)</p> <p>SET per Quantiferon</p>		<p>RDI: TERMOSTATAZIONE 24 h. A 37°C; CENTRIFUGAZIONE PER 15' A 4000 RPM</p> <p>ADERENTI/SERVICE: riempire categoricamente le provette fino al segno nero.</p> <p>Miscelare le provette per inversione 10 volte assicurandosi che l'intera superficie interna delle provetta sia ricoperta di sangue in modo che gli antigeni presenti sulle pareti reagiscano.</p> <p>Le provette devono essere conservate, in posizione verticale, a temperatura ambiente ed inviate in RDI entro 16 ore dal prelievo.</p>

Istruzioni per l'uso:

Le etichette devono essere applicate sulle provette con il lato sinistro rivolto verso il tappo.